



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab Eclipse

XXL-Rehab handleiding rolstoel - De Eclipse

Gebruik

Max 270 / 450 kg

Gebruikershandleiding

NL

Ideaal gebruik voor:

- Gebruikers met overgewicht.
- Ziekenhuizen.
- Verpleeghuizen.
- Thuis.



at forkorte rørene til ønsket længde med en

nedstryger eller rørskeer.

Gebruiksaanwijzing van de XXL-Rehab handmatige rolstoel - De Eclipse

VOORZICHTIG



Dit product mag niet worden gebruikt zonder de juiste instructies van een zorgverlener.

Als het product wordt gebruikt voor personen die meer wegen dan het maximum draagvermogen kan het product worden beschadigd.

Cobi Rehab aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie, montage of gebruik van dit product.

Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met Cobi Rehab. Gebruik **GEEN** vervangende onderdelen.

Cobi Rehab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of ongevallen die zich voordoen na reparatie door servicepersoneel zonder schriftelijke toestemming van Cobi Rehab.

 Lees voor het gebruik van de XXL-Rehab Eclipse deze instructies zorgvuldig door om juist gebruik te garanderen. Let hierbij vooral op de waarschuwingen gemarkeerd  met

Bedenk ook dat om letsel bij de gebruiker te voorkomen, de rolstoel alleen mag worden bediend door getrainde zorgverleners of assistenten of door


Gebruik

XXL-Rehab Eclipse is een unieke handmatige rolstoel waarvan het ontwerp en de configuratie-opties uniek zijn voor de behoeften en het lichaamstype van gebruikers met overgewicht.

De rolstoel heeft een tijdloos ontwerp. Hij is bedoeld voor gebruikers tot 270 kg (versterkte versie voor gebruikers tot 450 kg). Hij is geschikt voor gebruikers met verschillende diagnoses.

De rolstoel kan worden aangepast wat betreft zitdiepte, zitkanteling, rugleuningshoek en zithoogte.

De XXL Rehab Eclipse-rolstoel kan binnen en buiten worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om de rolstoel te gebruiken bij temperaturen tussen -5 graden en +40 graden Celsius, omdat het materiaal anders minder comfortabel aanvoelt.

 Het gebruik van het product voor personen die meer dan 270 kg/450 kg wegen kan een risico van kantelen of met zich meebrengen van de rolstoel.

Speciale opmerkingen

 **WAARSCHUWING/OPGELET** — opmerkingen zoals gebruikt in deze handleiding, zijn van toepassing op gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Het transporteren van een gebruiker beveiligd in de rolstoel in een gemotoriseerd voertuig.

XXL-Rehab raadt het transport af van rolstoelgebruikers in de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel in een gemotoriseerd voertuig.

Overzicht onderdelen

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Afneembare arMLEuning | 7. Wielvergrendeling |
| 2. Armsteunkussen | 8. Achterwiel |
| 3. Vrijgave arMLEuning | 9. Handwiel |
| 4. Buis voetsteun | 10. Basisframe |
| 5. Voetsteun | 11. Achterframe |
| 6. Zwenkwiel | 12. Rugsteun |



Veiligheidsopmerkingen

Waarschuwingen

Tijdens het eerste gebruik van uw rolstoel voert u een aantal oefeningen uit - samen met uw therapeut of andere gezondheidsdeskundige - om uw vermogen te trainen om veilig te reiken, naar voren te leunen, in en uit de rolstoel te stappen en vertrouwd te raken met de veiligheidsgrenzen.

- ⚠️ **PROBEER NIET** om naar voorwerpen te reiken als u in de stoel naar voren moet bewegen.
- ⚠️ **PROBEER NIET** om voorwerpen van de vloer op te rapen als u tussen uw knieën moet reiken.
- ⚠️ **PROBEER NIET** om naar een voorwerp achter de rolstoel te reiken door achterover de rugsteun te leunen.
- ⚠️ **PROBEER NIET** om uw gewicht/zitpositie in de richting van het bereik te verplaatsen, omdat hierdoor de rolstoel **KAN** kantelen.
- ⚠️ **Kantel de rolstoel NIET** zonder hulp.
- ⚠️ **GEBRUIK NOOIT** een roltrap om de rolstoel van de ene verdieping naar de andere te brengen. Dit kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- ⚠️ **PROBEER NOOIT** om een bewegende rolstoel te stoppen door de wielen te vergrendelen.
- ⚠️ **SCHAKEL ALTIJD DE VERGRENDelingen** in op beide wielen wanneer u in of uit de rolstoel stapt.
- ⚠️ **Gebruik de rolstoel NIET** op wegen, straten of snelwegen.
- ⚠️ **PROBEER NIET** om hellingen of hellende vlakken te nemen die steiler zijn dan 9°.
- ⚠️ **PROBEER NIET** om hellingen of hellende vlakken te nemen met ijs, olie of water.
- ⚠️ **PROBEER NIET** om over obstakels, zeer oneffen oppervlakken enz. te rijden. Dit kan kantelen met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- ⚠️ **GEBRUIK NOOIT** ongeautoriseerde onderdelen, accessoires enz. omdat hierdoor alle garanties komen te vervallen.
- ⚠️ **TIL de rolstoel NOOIT OP** aan afneembare onderdelen (armsteunen, wielen, rugsteun, voetsteunen, enz.).
- ⚠️ **VERWIJDER NOOIT** de anti-kantelbeveiligingen.
- ⚠️ **GEBRUIK de voetsteunen NIET** als platform wanneer u in of uit de rolstoel stapt.
- ⚠️ **PROBEER de rolstoel NIET** zonder hulp te kantelen.
- ⚠️ **Ga NOOIT** op het frame van de rolstoel **STAAN**.

Bandenspanning

Als luchtbanden worden meegeleverd, gebruik dan uw rolstoel **NIET** tenzij deze de juiste bandenspanning heeft (p.s.i.). Pomp de banden **NIET** te hard op. Als u deze suggesties niet opvolgt, kan de band ontploffen en lichamelijk letsel veroorzaken.

Vervanging van een luchtband **MOET** worden uitgevoerd door een erkende dealer.

Krachtraining

De XXL-Rehab Eclipse-rolstoel is niet bedoeld of getest voor gebruik tijdens krachttraining. Als de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel wordt gebruikt tijdens krachttraining, is Cobi Rehab niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel en komen alle garanties onmiddellijk te vervallen.

Voor veilige bediening van de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel moeten zowel u als uw assistent bekend zijn met de instructies in deze handleiding. Analyseer samen met uw therapeut de technieken die nodig zijn om in en uit de rolstoel te stappen, naar voorwerpen te reiken, enz. Dit zal u vertrouwd maken met wat u **NIET** en **WEL KUNT DOEN** tijdens het gebruik van de rolstoel. Het is belangrijk om alle overdrachtstechnieken te oefenen totdat u zich volledig veilig voelt, waardoor u de meest voorkomende obstakels kunt nemen.

Stabiliteit en balans

Hanteer altijd de juiste balans om de rolstoel zo stabiel mogelijk te houden. De rolstoel is zo gemaakt dat die tijdens normale dagelijkse activiteiten rechtop blijft mits u niet buiten het zwaartepunt komt.

Bijna alle activiteiten in de rolstoel maken dat het zwaartepunt verschuift. Voor veel activiteiten moet u reiken, leunen of in en uit de rolstoel gaan. Deze bewegingen zullen de normale balans, het zwaartepunt en de gewichtsverdeling van de rolstoel veranderen. Om uw specifieke veiligheidsgrenzen vast te stellen, oefen alle leun-, reik- en verplaatsingsactiviteiten uit met de hulp van een gekwalificeerde assistent/therapeut voordat u de rolstoel actief gaat gebruiken.

⚠️ **LEUN NIET** verder naar voren dan de arMLEUNINGEN van de rolstoel.

Zorg dat de zwenkwielen naar voren wijzen wanneer u naar voren leunt. Dit kan worden bereikt door de stoel eerst iets naar voren te bewegen en vervolgens iets naar achteren in een rechte lijn.

Omgaan met dagelijkse obstakels

Omgaan met de irritatie van dagelijkse obstakels kan enigszins worden verlicht door te leren hoe u uw rolstoel kunt beheren. Houd rekening met de zwaartekracht om uw stabiliteit/balans te behouden.

Opmerking voor rolstoelassistenten

Als de rolstoelgebruiker assistentie nodig heeft, moet u eraan denken om goede lichaamsmotoriek te gebruiken. Houd uw rug recht en buig uw knieën wanneer u de rolstoel kantelt of stoepranden of andere belemmeringen kruist.

Let op verwijderbare (afneembare) delen. Deze mogen **NOOIT** worden gebruikt voor hand- of hefsteunen, omdat ze onbedoeld kunnen losraken. Dit kan leiden tot letsel bij de gebruiker en/of assistent(en).

Vraag bij het leren van een nieuwe assistentietechniek eerst hulp van een ervaren assistent voordat u het alleen probeert.

Kantelen

⚠ WAARSCHUWING: KANTEL de rolstoel **NIET** zonder hulp. Bij het kantelen van de rolstoel moet een assistent de achterkant van de rolstoel op een niet-verwijderbaar (niet-afneembaar) deel vastpakken. Informeer de rolstoelgebruiker voor het kantelen en herinner hem/haar eraan achterover te leunen. Controleer dat de handen en voeten van de rolstoelgebruiker de wielen niet blokkeren.

Kantelen - stoepranden

Na het beheersen van de technieken van het kantelen van de rolstoel, gebruikt u deze procedure om lage stoepranden, korte trappen, enz. aan te kunnen.

Roltrappen

⚠ Gebruik **GEEN** roltrap om een rolstoel van de ene verdieping naar de andere te brengen. Dit kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.



FIG. 1

Verplaatsen van en naar een andere stoel

WAARSCHUWING — VOORDAT u probeert in of uit de rolstoel te stappen, moeten alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om de afstand tussen de openingen te verkleinen. Draai de beide zwenkwielen naar het voorwerp waar u naar toe wilt. Zorg er ook voor dat de wielvergrendelingen zijn ingeschakeld om te voorkomen dat de wielen bewegen.

⚠ VOORZICHTIG — Plaats uzelf tijdens het verplaatsen zo ver mogelijk achterin de stoel. Dit voorkomt het beschadigen van de bekleding en de kans dat de rolstoel naar voren kantelt.

⚠ OPMERKINGEN — Deze activiteit kan onafhankelijk worden uitgevoerd, op voorwaarde dat u over voldoende mobiliteit en kracht van het bovenlichaam beschikt.

- 1 Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk langs de zijkant van de stoel waar u naar toe wilt, met de voorste zwenkwielen ernaar toe gericht. Schakel de wielvergrendelingen in. Verplaats het lichaamsgewicht naar de stoel waar u naar toe wilt.
- 2 Tijdens de onafhankelijke verplaatsing zal er weinig of geen zitplatform onder u zijn. Gebruik indien mogelijk

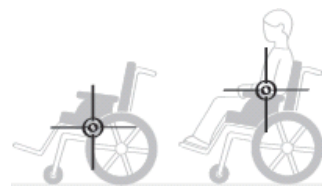


FIG. 2

FIG. 2

Verandering van gewichtsverdeling

⚠ WAARSCHUWING - Probeer **NOOIT** naar voorwerpen te reiken als u naar voren moet bewegen in de stoel of ze van de vloer wilt pakken door tussen uw knieën te reiken.

Voor veel activiteiten moet de rolstoelgebruiker reiken, leunen of in en uit de rolstoel gaan. Deze bewegingen zullen de normale balans, het zwaartepunt en de gewichtsverdeling van de rolstoel veranderen. Om uw specifieke veiligheidsgrenzen vast te stellen, oefen alle buig-, reik- en verplaatsingsactiviteiten in verschillende combinaties met de behulp van een gekwalificeerde gezondheidsdeskundige **VOORDAT** u probeert de rolstoel actief te gebruiken.



FIG. 3

FIG. 3

Functioneel bereik vanuit een rolstoel

De juiste positionering is essentieel voor uw veiligheid. Bij reiken, leunen of voorover buigen is het belangrijk om de voorwielen te gebruiken als hulpmiddel om stabiliteit en balans te behouden.

Uitpakken en monteren

Checklist uitpakken

1. Controleer op duidelijke schade aan de doos of de inhoud. Neem direct contact op met de dealer/transporteur als er schade is.
2. Verwijder alle losse verpakkingen uit de doos.
3. Haal alle onderdelen uit de doos.

Controleer na het openen van de doos met de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel of deze de volgende standaardartikelen bevat:

1. Eén Eclipse-frame
2. Twee achterwielen
3. Twee snelvergrendelingsassen
4. Twee anti-kantelbuizen
5. Twee armleuningassemblages
6. Eén Eclipse-achterkant
7. Een paar voorbevestigingen (optioneel)
8. Twee sectorblokken (optioneel)

⚠ OPMERKING — Tenzij de XXL-Rehab Eclipse onmiddellijk moet worden gemonteerd, bewaart u de dozen en het verpakkingsmateriaal voor gebruik bij het opbergen van de rolstoel totdat de montage vereist is.

Montage

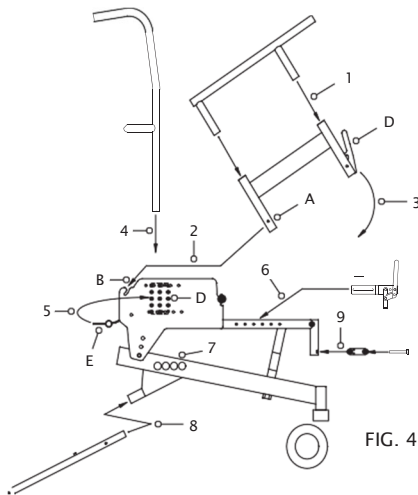


FIG. 4

1. Plaats de bovenste armsteun in de onderste armsteun
2. Schuif pin A in sleuf B
3. Draai de armsteun zodat de vergrendeling C op de zijplaat vergrendelt
4. Steek de achterste buizen in de aansluiting D
5. Zit pin E vast om de achterkant te vergrendelen
6. Installeer de wielvergrendelingen op de gekozen wielpositie
7. Installeer de achterwielen in de gekozen wielpositie met de snelkoppelingsassen
8. Plaats de anti-kantelbuizen
9. Installeer de sectorblokken en voorbevestigingen

Aanpassing voor gebruiker

De volgende instructies leggen uit hoe u de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel moet afstellen. Na het maken van de aanpassingen is het erg belangrijk om te controleren of alle delen goed zijn bevestigd.

Gereedschap

Philips schroevendraaier

Inbussleutels: 1/8', 5/32', 3/16'

Verstelbare of steeksleutel: 7/16', 1-1/4', 1-5/16'

inbusschroevendraaier met insteekoppen: 9/16', 3/4', 1-1/4'

Afneembare arm

Voor het terugdraaien en armleuning verwijderen/aanpassen van de hoogte van de armleuning

De ontgrendelhendel van de armsteun bevindt zich aan de zijkant van de stoel, aan de voorzijde van de armsteunbuis, onder het armsteunkussen. Ontgrendel de arm door de ontgrendelhendel van de armleuning

in een achterwaartse richting te bewegen ongeveer 1/2'. De voorzijde van de armleuning kan dan omhoog en uit de ingeschakelde/vergrendelde positie zwaaien. De verbinding van de achterarm kan nu indien nodig worden losgemaakt van de beschermkap.

Om de armleuning te vervangen en te vergrendelen, verschuift u eerst de achterste buis van de armsteun in de achterste gleuf op de beschermkap. Met de poot van de achterste armsteun in de gleuf 'geplaatst', draait u de voorste armsteunbuis naar beneden en naar zijn plaats over de voorkant van de beschermkap. Til de armsteun op zonder de ontgrendelingshendel te activeren om ervoor te zorgen dat de arm is vergrendeld.

Wielvergrendelingen

Activeer de 'Push to Lock' wielvergrendeling door de hendel naar voren te duwen. Om de vergrendelingen aan te passen, draait u de bout en moer los die door de montagebeugel en het frame lopen. Schuif de klem in de richting van het achterwiel totdat de wielvergrendelingschoen ongeveer 1/8' is ingebed in het bandmateriaal, wanneer de hendel in de vergrendelingsstand staat. Draai de bout en moer weer vast om de montagebeugel op de gewenste locatie te bevestigen. Inspecteer voor juiste vergrendeling VOOR feitelijk gebruik. Als de vergrendeling versleten of beschadigd is, vervangt u de volledige assemblage direct.

⚠ WEES VOORZICHTIG: DE WIELVERGREDELING IS GEEN REM. Probeer NIET om een bewegende rolstoel met de wielvergrendeling te stoppen. Bij het in- of uitstappen van de rolstoel, moet u **ALTIJD BEIDE WIELVERGREDELINGEN INSCHAKELEN.**

Verstelbaar achterframe

Bepaal de juiste zitdiepte onder begeleiding van een zorgverlener. Pas de zitdiepte en rugleuning aan zodat die overeenkomt met de gewenste diepte en de hoek van de rugleuning. Beweegbare houders voor de rugleuning moeten worden bevestigd met vier bouten in vooraf geïnstalleerde gatenpatronen. Zorg dat op de linker- en de rechterzijmontage identieke gatlocaties worden gebruikt. Uw dealer kan de hoogte van het achterframe op maat zagen tot de gewenste lengte met behulp van een metalen zaag of snijgereedschap voor buizen.

Montage

Bekleding

De rugbekleding kan worden aangepast door de haak- en lusbevestigingen los te draaien of vast te draaien. Maak de bevestigingen los voor optimaal passen en laat de gebruiker zo in de rolstoel plaatsnemen zodat het bovenste deel van de bekleding de bovenrug ondersteunt. Draai de bevestigingen weer stevig vast.

Bekleding vervangen/aanpassen

Cobi Rehab stelt voor dat u bestudeert hoe u de bekleding aan de stoel vastmaakt voordat u wijzigingen aanbrengt.

Controleer de bekleding regelmatig op tekenen van scheuren en doorzakken. Als deze aanwezig zijn, controleer de voering om te bepalen of deze ook is beschadigd of verzwakt. Vervang de bekleding onmiddellijk als die is beschadigd of als de voering is doorgezakt. Dit zorgt voor een uniforme strakheid die mogelijk niet wordt bereikt wanneer de bekleding gedurende een bepaalde periode is gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING: Wassen of vocht zal de vlamvertraging van de bekleding aantasten.

Voorbevestigingen

Bevestig de ophangbeugels aan de houders van de rolstoel.

1. De aanpassing vindt plaats op de gewenste lengte met individuele zitting in een rolstoel met voeten op de voetsteunen. Gebruik een sleutel en een schroevendraaier met zeskantige kop om de bout op de schuifbuis van de voetsteunen los of vast te draaien.
2. Verwijder de zeskantbout en buisklem en schuif de voetensteun omhoog of omlaag totdat de gewenste lengte is bereikt. Monteer vervolgens de zeskantbout in de buisklem en in het ingewerkte kleminzetstuk. Het laagste punt van de voetsteunen moet zich niet minder dan 2-1/2' van de grond of vloer bevinden.

OPMERKING: Controleer of de gewenste afstelling aan de voorzijde geen druk uitoefent op de benen aan de voorkant van de stoelbekleding. Een dergelijke situatie kan letsel veroorzaken bij de rolstoelgebruiker.

⚠ WAARSCHUWING: PROBEER NIET OP DE VOETSTEUNEN TE STAAN.

Als u op de voetsteunen gaat staan, zal de stoel abrupt voorover kantelen en kan de persoon een val maken en daardoor letsel oplopen. **PROBEER NIET** om de rolstoel bij de voet- of beensteunen op te tillen. Deze onderdelen kunnen eraf worden gehaald en/of wegdraaien van de rolstoel.

De voetsteunen **MOETEN** rechtop staan en naar buiten zijn gedraaid bij het in of uit de rolstoel stappen.

Achterwielen

De achterwielen/-assen verwijderen/installeren

1. Duw op de punt van de snelspanas en trek het wiel uit de as.
2. Duw weer op de punt van de snelspanas en trek de as uit de wielnaaf.
3. Herhaal de stappen 1-2 voor het andere achterwiel.
4. Om het achterwiel weer op de rolstoel te plaatsen, voert u de stappen 1-3 in omgekeerde volgorde uit.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de klikpen en de borgpennen van de snelspanas volledig zijn ontgrendeld **VOORDAT** u de rolstoel gebruikt. De borgpennen **MOETEN** voorbij de buitenkant van de ontvanger van de achterwielas uitsteken voor een positieve vergrendeling. Houd de borgpennen schoon.

Afstellen van de snelspanas

1. Installeer het achterwiel en de snelspanas op de rolstoel.
2. Druk de klikpen in de snelspanas en schuif de as door de wielnaaf.
3. Laat de borgpen los en zorg ervoor dat de borgpennen volledig zijn ontgrendeld.
4. Verhoog of verlaag de eindspeling door de borgmoer op het uiteinde van de snelspanas aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de klikpen van de snelspanas volledig is ontgrendeld **VOORDAT** u de rolstoel gebruikt.

Houd de borgpennen schoon.

Montage

Rugsteunafstelling (zitdiepte/rugverstelling)

Installeer de rugsteunconstructie op de frameconstructie door het onderste uiteinde van de rugbuizen in de houders van de rugbuis op het frame te schuiven. Merk op dat de locatie van de rug kan worden aangepast voor kortere of langere zitdiepten en de rugleuninghoek kan worden aangepast door verschillende combinaties van montagegaten te kiezen bij het bevestigen van de achterste buishouder aan het frame.

Installatie rugverstelling

Een rugverstelling kan worden besteld samen met de originele uitrusting of achteraf worden gemonteerd op een bestaande Eclipse-rolstoel. Wanneer u een rugverstellingconstructie installeert, verwijdt u de originele rugsteunhulzen en monteert u de rugverstelling op 6 locaties langs de beschermkap (3 bouten aan elke zijde). Merk op dat de locatie van de rug kan worden aangepast voor kortere of langere zitdieptes.

Belangrijk! Verplaats de achterwielen naar de achterste positie van de asmontage. Deze aslocatie wordt aanbevolen om maximale stabiliteit te bieden wanneer de rug ingeklapt is. Installeer extra lange anti-kantelbuizen (meegeleverd met de rugsteunverstellingset). De extra lange anti-kantelbuizen bieden extra bescherming tegen het omvallen van de rolstoel wanneer deze achterover ligt. Zorg ervoor dat u de stabiliteit van de rolstoel in volledig achteroverliggende stand controleert met de gebruiker in de rolstoel om een acceptabele stabiliteit achterwaarts te garanderen voordat de gebruiker naar huis gaat.

Opmerking bij aanpassing van de subassemblage van de achteras en anti-kantelontvanger: De locatie van het achterwiel wordt in de fabriek ingesteld op de standaardpositie, tenzij anders aangegeven via de klantorder. De locatie van de achterwielas kan naar elk van de vier locaties worden verplaatst. Gebruik de volgende procedure om de achteras te verplaatsen;

De anti-kantel-ontvanger is aan het frame bevestigd via de asontvanger en twee 7/8 OD-sluitringen die voorkomen dat het anti-kantelsubassemblage roteert. De 7/8 sluitringen kunnen op een van de twee mogelijke locaties worden vergrendeld, afhankelijk van de gewenste locatie voor de achteras.

Bepaal welke van de vier achterasposities gewenst is. Wanneer een van de twee voorste asposities wordt gebruikt, moeten de 7/8 OD-sluitringen zich in de opening 'achterwaarts' bevinden. Wanneer een van de twee achterste asposities wordt gebruikt, moeten de 7/8 OD zich in de opening 'vooruit' bevinden.

Monteer de 3/8-16 x 3/4' inbuschroef, 3/8 ID x 7/8 OD-sluitringen (2 st.) en 3/8 borgmoer op de anti-kantelontvangers. Draai de inbusbout en -moer niet vast totdat de sluitringen op hun plaats zitten in een asgat (zie hieronder).

Bij elke asontvanger: Installeer de asontvanger plus 2 sluitringen (59/64 ID x 1-19/64 OD) plus een ontvangermoer. Een van de sluitringen moet tussen de ontvangerkop en de 1 x 2 zijbuis worden geïnstalleerd. De andere sluitring moet naast de moer worden geplaatst. Wanneer de asmoer bijna goed vastzit, gebruikt u de hamer en de middelste pons om de 7/8 OD-sluitringen in een van de 7/8 ID-gaten in het zijframe te duwen. Draai tot slot alle schroeven en moeren vast. **DRAAI DE ASMOER NIET TE VAST AAN. BIJNA VAST IS VOLDOENDE!**

Verplaats de wielvergrendelingen zoals vereist om overeen te komen met de nieuwe achterwiellootlocatie.

Afstelling bovenste frame, hoogte en kanteling

⚠ Opmerking: De instellingen voor de framehoogte en de zitting worden fabrieksmatig ingesteld op de standaardpositie tenzij anders aangegeven via de klantorder. De zithoogte en kantelpositie kunnen naar drie hoogtes en kantelingen worden verplaatst. Gebruik de volgende procedure om de zithoogte en kanteling te wijzigen.

Om de zithoogte te wijzigen, draait u de stelschroef los en verwijdt u vervolgens de 1/2' DIA-bout onder het frame die het bovenste frame met het onderste frame verbindt. Wanneer de 1/2' bout is verwijderd, kunt u de zithoogte variëren. Zorg ervoor dat u de originele afstelling aanhoudt voor de schokdempers. Er moet een 1/2' lange schokdemper plus 2 sluitringen onder de onderste zijrail zijn geplaatst. Er moet een 1' lange schokdemper net onder het bovenste frame zitten, waar de 1/2' bout in het bovenste frame wordt geschroefd.

Gebruik voor een zithoogte van 15' de 5' bout plus 1' urethaanhuls zonder afstandsstuk.

Gebruik voor een zithoogte van 16' de 6' bout plus 1' urethaanhuls en een afstandsstuk van 1'.

Gebruik voor een zithoogte van 17' de 7' bout plus 1' urethaanhuls en een afstandsstuk van 2'.

Gebruik alleen bouten en afstandsstukken geleverd door Cobi Rehab. De 1/12' bout moet minimaal 1' in het bovenste frame worden geschroefd.

Draai de stelschroef weer vast om ervoor te zorgen dat de 1/2' bout niet losraakt tijdens het gebruik van de rolstoel.

Om de kanteling van de stoel te wijzigen, verplaatst u de 3/8' bout en moer in het achterste deel van het frame naar een van de drie mogelijke kantelposities zoals bepaald door de drie gaten aan de achterkant van de zijplaat van het bovenste frame. **DRAAI DE MOEREN NIET TE VAST AAN. 'BIJNA VAST' IS VOLDOENDE.** (Merk op dat het niet mogelijk is om de achterste zitkanteling te verkrijgen bij lage zithoogtes (14' of 15' zithoogte).

Wielvergrendeling afstellen

Wielvergrendelingen worden aan het zitframe bevestigd met twee ¼ - 20 inbusbouten. Aan de binnenkant van het zitframe bevinden zich borgmoeren die gemakkelijk toegankelijk zijn. Om de 'nauwheid' van de wielvergrendelingen te blokkeren, maakt u de inbusbouten iets los, schuift u indien nodig de wielblokkering naar voren of naar achteren en draait u de inbusbouten weer vast. Test de aanpassing door de wielblokkering toe te passen om te zorgen dat deze voldoende kan worden ingeschakeld.

Montage

Speciale opmerking: Wanneer de zithoogte op grote hoogte is ingesteld en de achterwielen zich op de achteras bevinden, moet u mogelijk de wielvergrendelingen aan de achterkant monteren om ervoor te zorgen dat de remschoen contact maakt met de band. Dit kan worden gedaan door alleen het deel van de wielvergrendeling dat aan het frame van de rolstoel wordt bevestigd aan de achterkant te monteren, waardoor de hendel en de schoen meer naar achteren kunnen worden geplaatst.

Aanpassing framebreedte

Om de framebreedte aan te passen, hebt u een breedte-aanpassingsset van Cobi Rehab nodig. De set bevat 6 verlengstukken die nodig zijn om de nieuwe breedte, de nieuwe rugbreedte en een nieuwe zitbreedte vast te stellen.

Verwijder de rugsteun van de rolstoel. Verwijder de oude rugbekleding. Sla de 2 rolpenen (in de dwarsbalk) uit die worden gebruikt om de breedte van de rugsteun te behouden. Demonteer de 2 helften van de rugsteun. Installeer de nieuwe breedte-instelhuls of verwijder indien nodig de hulzen. Zet de twee helften van de rugsteunbuizen weer in elkaar. Terwijl de buizen van de rugsteunbuizen parallel aan elkaar worden gehouden, boort u door de nieuwe 1/8' rolpengaten, zodat u de rolpenen opnieuw kunt installeren.

Verwijder het zitdeel. Demonteer het onderste frame door de 5 bouten te verwijderen die de bestaande stoelbreedte behouden. Installeer de nieuwe breedte-instelhuls of verwijder indien nodig de hulzen. Zet de twee helften van het frame weer in elkaar. Installeer het nieuwe zitdeel.

Gebruik van motorvoertuigen


⚠ WAARSCHUWING

Bepaal of uw stoel is uitgerust met het vervoerbeveiligingssysteem (TTDS).

⚠ Als uw stoel **NIET** is uitgerust met het vervoerbeveiligingssysteem (TTDS) voldoet deze rolstoel **NIET** aan de normen voor zitplaatsen in motorvoertuigen.

Als uw stoel is uitgerust met het vervoerbeveiligingssysteem (TTDS):

1. Indien mogelijk en haalbaar moet de bestuurder plaats nemen in de originele voertuigstoel van de apparatuur fabrikant en de voertuigbeveiliging gebruiken.
2. Gebruik alleen rolstoel- en inzittendenbeveiligingsystemen (WTORS) die voldoen aan de vereisten van 'SAE J2249 Aanbevolen werkwijze - rolstoel- en inzittendenbeveiligingsystemen voor gebruik in motorvoertuigen'. Gebruik geen WTORS die zijn bedoeld om te vertrouwen op de structuur van de rolstoel om de beveiligingsbelastingen van de inzittenden over te dragen naar het voertuig.
3. De bestuurder mag niet meer dan 270 kg wegen.
4. De rolstoel is dynamisch getest in een vooruit gerichte modus voor een frontale botsingtest. De rolstoel moet tijdens het transport naar voren zijn gericht.
5. Om het risico op letsel voor inzittenden van het voertuig te verminderen, moeten op de rolstoel gemonteerde accessoires zoals bladen en ademhalingsapparatuur worden verwijderd en afzonderlijk worden vastgezet.
6. Houdingssteunen en positioneringsapparatuur mogen niet worden gebruikt voor het vastzetten van de inzittende.
7. Wijzig of vervang geen onderdelen, componenten of zitting van het rolstoelframe.
8. De onderstaande afbeeldingen tonen de locaties van de bevestigingspunten van de rolstoel voor en achter.

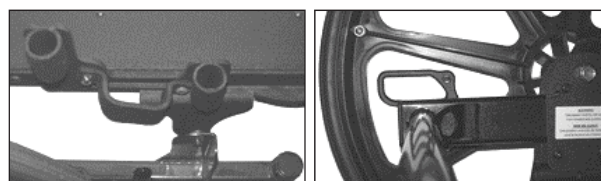

Vorbinder

Achterbinder

9. Gebruik alleen met de rolstoel- en inzittendenbeveiligingsystemen (WTORS) die zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en SAE J2249.

⚠ Volg altijd de voorschriften van uw eigen land.

Checklist voor veiligheidsinspectie

Onderhoud en reiniging

Reiniging

Regelmatig reinigen van alle oppervlakken zal het uiterlijk van de rolstoel behouden en de levensduur verlengen. Alle oppervlakken kunnen worden gereinigd met een milde zeepoplossing. Spuit indien nodig de stoel in met VIRKON en veeg de stof af volgens de gebruiksaanwijzing.

- ⚠ **GEBRUIK NOOIT OPLOSMIDDELEN.** U kunt de stoel ook schoonmaken door hem met spiritus af te vegen.
- ⚠ **OPMERKING:** Reinigen en weken van de rugbekleding vermindert het vlamvertragende effect.

Onderhoudsprocedure

1. Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten voordat u de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel gebruikt. Controleer alle delen op slijtage en beschadiging en vervang ze indien nodig. Controleer of de rolstoel correct is afgesteld om te passen bij de gebruiker.
2. Houd de assen vrij van vuil en pluis om ervoor te zorgen dat het mechanisme correct vergrendelt en dat de wielen vrij kunnen draaien.
3. Vergeet niet om de assen ten minste een maal per maand te smeren (gebruik 3-in-1 olie of een vergelijkbaar product).
WAARSCHUWING— Als luchtbanden worden gebruikt, gebruik dan uw rolstoel niet tenzij die de juiste bandenspanning heeft (p.s.i.). Pomp de banden NIET te hard op. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan de band ontploffen en lichamelijke letsels veroorzaken.
4. Als de rolstoel over luchtbanden beschikt, staat de aanbevolen bandenspanning vermeld op de zijkant van de band.
5. Controleer de wielen en banden regelmatig op scheuren en slijtage en vervang ze indien nodig.
6. Controleer regelmatig of de hoepels goed vastzitten aan het wiel.

Algemene opmerkingen

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de leverancier. In bepaalde gevallen moet de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel worden geïnspecteerd door de leverancier. Dit geldt met name in het geval van:
- breuk of schade aan het frame.
- breuk of schade aan een lasverbinding.

Neem altijd contact op met de leverancier voordat u een XXL-Rehab Eclipse-rolstoel of een deel daarvan terugstuurt. Wanneer u de rolstoel terugstuurt, is het belangrijk om deze in een doos te verpakken die is vastgezet op een pallet. Cobi Rehab is niet aansprakelijk voor transportschade aan artikelen die aan Cobi Rehab zijn teruggezonden.

⚠ **OPMERKING** — Breng uw rolstoel twee keer per jaar naar een erkende dealer voor een grondige inspectie en onderhoud.

Regelmatig schoonmaken onthult losse of versleten onderdelen en verbetert de soepele werking van uw rolstoel. Om goed en veilig te kunnen werken, moet uw rolstoel net als elk ander voertuig, worden verzorgd. Routinematig onderhoud verlengt de levensduur en efficiëntie van uw rolstoel.

Eerst moeten aanpassingen moeten worden gedaan om aan uw persoonlijke lichaamsstructuur en voorkeur te voldoen. Volg daarna deze onderhoudsprocedures:

Specificaties

Maximale gewichtscapaciteit is	270 / 450 kg
Totale breedte	Stoelbreedte + 18 cm
Totale lengte zonder voetsteunen	87 cm
Stoelbreedte	50 / 55 / 58 / 61 / 66 / 72 / 76 / 82 / 92 / 102 / 112 cm
Stoeldiepte	41-56 cm
Stoelhoogte	36-51 cm
Rughoogte	65-75 cm
Aanpassingshoek rugsteun	Ja
Aanpassingshoogte armsteun	Ja
Verwijderbare armsteunen	Ja
Aanpassingshoogte voetsteunen	Ja
Naar buiten te draaien en afneembare voetsteunen	Ja
Gewicht	Ong. 30 kg
Gebruik	Handleiding
Vlamvertragende omslag	Ja
Kleur omslag	Zwart
Framekleur	Rood
Duwhendel	Ja
Snelspanner op achterwielen	Ja
Af te stellen balanspunt	Ja
Vaste stoel	Ja
Frame	Staal met poedercoating
Achterwielen	24' massieve PU-banden
Zwenkwielen	125 mm nylon met PU
Stoel/rugsteun	Polyester/nylon
Armsteunen	Polyurethaan
ISO-classificatie	ISO 12 22 03 - 08

FABRIKANT

PDG Product Design Group
Unit 103 - 318 East Kent Ave. South
Vancouver, BC, Canada V5X 4N6

DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denemarken
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

Problemen oplossen

Item	Eerste keer	Wekelijks inspecteren /aanpassen	Maandelijks inspecteren/aanpassen	Halfjaarlijks inspecteren/aanpassen
ALGEMEEN				
De rolstoel rijdt rechtdoor	X	X		X
Controleer dat alle hardware vastzit	X			
WIELVERGRENDINGEN				
⚠ Belemmeren het draaien van de wielen niet	X		X	
Draaipunten zijn vrij van slijtage en speling	X		X	
Wielvergrendelingen zijn stevig maar eenvoudig in te schakelen	X		X	
KLEDINGBESCHERMERS				
Inspecteer op gebogen of uitstekend metaal	X			X
Zorg ervoor dat alle bevestigingen goed vastzitten	X			X
STOEL/RUGBEKLEDING				
Inspecteer of scheuren of doorzakken	X			
Inspecteer de bevestiging of deze goed vastzit	X		X	X
ACHTERWIELEN				
Geen overmatige zijbeweging of binding bij het optillen en draaien	X			X
Snelspanassen vergrendelen correct	X	X		X
ZIJWIELEN VOOR				
Inspecteer de wiel-/vorkconstructie op juiste spanning door het zwenkwiel te draaien; het zwenkwiel moet geleidelijk stoppen	X		X	
Wielagers zijn schoon en vrij van vocht	X	X		
⚠ WEES VOORZICHTIG: Wielen en banden moeten periodiek worden gecontroleerd op breuk, scheuren en slijtage en moeten indien nodig worden vervangen	X		X	
BANDEN				
Inspecteer op vlakke plekken en slijtage	X		X	
Controleer bij luchtbanden op juiste installatie	X	X		
Controleer de achterbanden op scheuren en slijtage	X			X
⚠ WEES VOORZICHTIG: Wielen en banden moeten periodiek worden gecontroleerd op breuk, scheuren en slijtage en moeten indien nodig worden vervangen				
REINIGEN				
Reinig en zet alle onderdelen in de was				X
Reinig de bekleding en armsteunen				X
Inspecteer of de assen vrij zijn van vuil, pluizen, enz.			X	
Inspecteer of de kantelschuiven en rollagers vrij zijn van vuil, pluizen, enz.			X	

Garantie

De XXL-Rehab Eclipse-rolstoel heeft een jaar garantie vanaf de factuurdatum voor materialen en afwerking. Het eigenlijke rolstoelframe (onderste frame) heeft een garantie van vijf jaar vanaf de factuurdatum.

Producten die zijn gebruikt voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik of die onderhevig zijn geweest aan nalatigheid, misbruik, onjuiste opslag of behandeling, onjuiste bediening, ongeautoriseerde wijzigingen of schade die verder gaat dan normale slijtage zoals bepaald door Cobi Rehab, vallen niet onder deze garantie.

Als de gewichtscapaciteit wordt overschreden, komt de garantie te vervallen. Alle niet-geautoriseerde reparaties aan het product/onderdeel, evenals het knoeien met de componenten, maken de garantie ongeldig.

Probleem	Oplossing
Stoel beweegt naar rechts Stoel beweegt naar links Trage bocht of uitvoering Zwenkwielen fladderen 3 of 4 wielen die contact maken met het grondoppervlak	Indien er sprake is van luchtbanden, controleer de banden op correcte/gelijke druk
Trage bocht of uitvoering Zwenkwielen fladderen Piept en rammelt Losheid in stoel	Controleer op losse draadbussen en bouten
Stoel beweegt naar rechts Stoel beweegt naar links Trage bocht of uitvoering Zwenkwielen fladderen	Controleer de hoek van het zwenkwiel
Stoel beweegt naar rechts Stoel beweegt naar links Zwenkwielen fladderen	Controleer of beide zwenkwielen tegelijkertijd contact maken met de grond



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

GEBRUIKSHANDLEIDING XXL-Rehab handleiding rolstoel – De Eclipse